

Notice d'utilisation et entretien

Lisez ce guide et conservez-le

Merci d'avoir choisi **Loomy-Protekt**.

Cette notice d'utilisation et d'entretien est conçue pour vous fournir toutes les informations nécessaires concernant le montage, l'utilisation et l'entretien de la visière.

Afin de monter la visière correctement et de manière sécurisée, lisez ce guide d'utilisation attentivement avant de monter et d'utiliser la visière.

Sommaire :

• POUR NOUS CONTACTER.....	1
• COMPOSITION	1
• LE TUTORIEL VIDÉO EN LIGNE	1
• MONTAGE.....	2
• UTILISATION.....	3
• NETTOYAGE / ENTRETIEN	4
• PROTOCOLE ET NETTOYAGE	4

La visière Loomy-Protekt est un masque de protection contre les projections type gouttelettes à utiliser en plus des protections habituelles pour une efficacité optimale (notamment dans le secteur médical - lorsque des soins avec contact rapproché sont nécessaires auprès des patients par exemple). Il ne s'agit pas d'un produit de santé réglementé et ne porte donc pas au titre de la réglementation de marquage CE. Cependant, la visière Loomy-Protekt de par son côté rassurant apporte du confort et une sécurité supplémentaire en évitant toute projection au niveau des yeux, de la peau et de la bouche, et de porter les mains au visage.

• Pour nous contacter

Nous sommes à votre disposition pour toutes demandes complémentaires concernant les visières Loomy-Protekt sur : contact@loomy-protekt.fr

• Composition

Notre visière est composée de deux éléments :

- Une visière en Polycarbonate 375µ
- Un bandeau en Mylar 350µ

• Le tutoriel vidéo en ligne

Pour accéder à **notre vidéo tutoriel de montage** de la visière, il vous suffit de scanner le QR code ci-contre ou de vous diriger sur le lien ci-après.

<https://urlz.fr/cshZ>

Pour scanner :

Sur iPhone : Il vous suffit d'ouvrir votre appareil photo et de viser le QR code, une notification s'affichera et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus.

Sur Android : Téléchargez une application QR code sur PlayStore, ouvrir l'application et viser le QR code via l'application.




• Montage

Première étape :


Vous disposez donc de deux éléments (1a.). Sur la visière, enlevez les deux films de protection sur les deux faces de la visière (1b.).

Disposez le haut de la visière sur le bandeau (1a.)
Nettoyez la visière avec de l'eau savonneuse et un chiffon ou avec du gel hydro alcoolique avant la première utilisation (1c.)

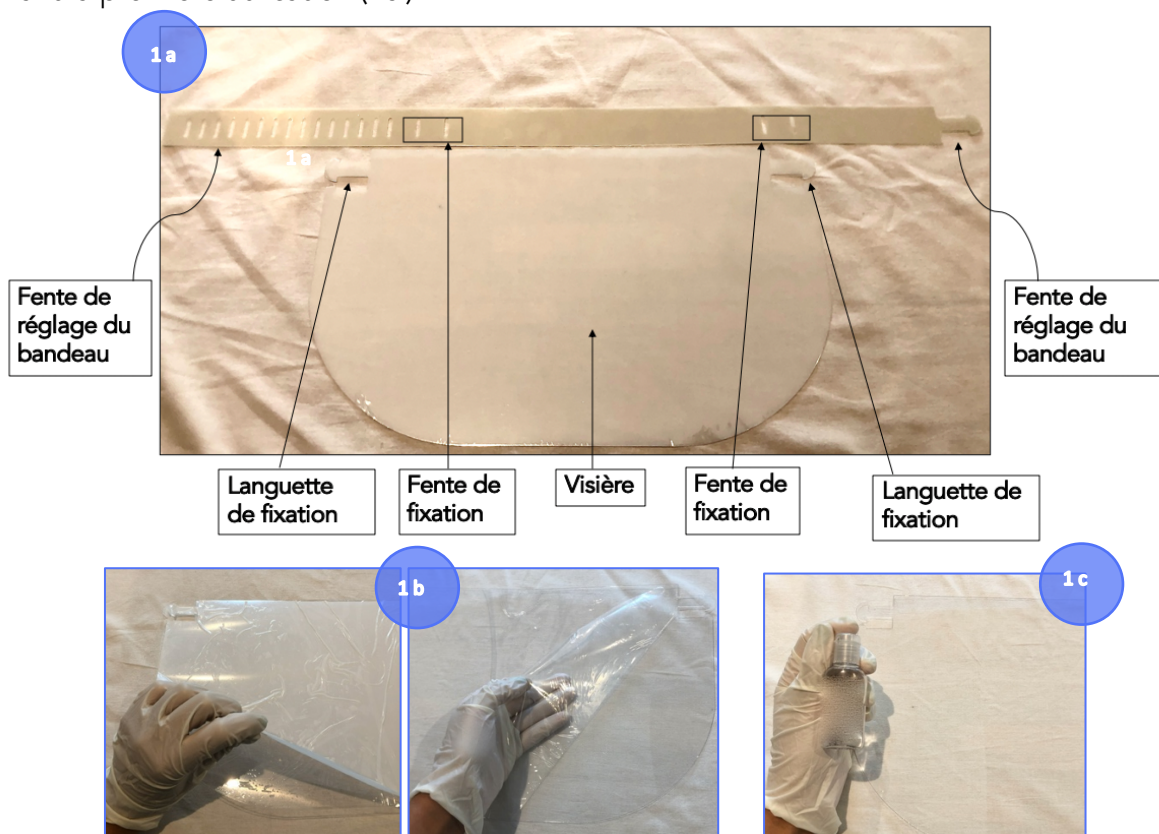


Deuxième étape :

Insérez la languette droite de la visière dans la 1^{ère} fente de droite du bandeau, en l'inclinant à 45° afin que la languette rentre **sans forcer** dans la fente de l'intérieure (2a.). Une fois la languette insérée dans la 1^{ère} fente, retournez la visière et le bandeau pour insérer la languette dans la 2^{ème} fente du bandeau. En l'inclinant de même à 45° pour une insertion facile (2b.). Répétez ces opérations pour fixer la 2^{ème} languette de la visière dans les deux autres fentes. Votre visière est ainsi fixée au bandeau. Les fentes et la languette du réglage du bandeau doivent être des deux côtés extérieurs de la visière.

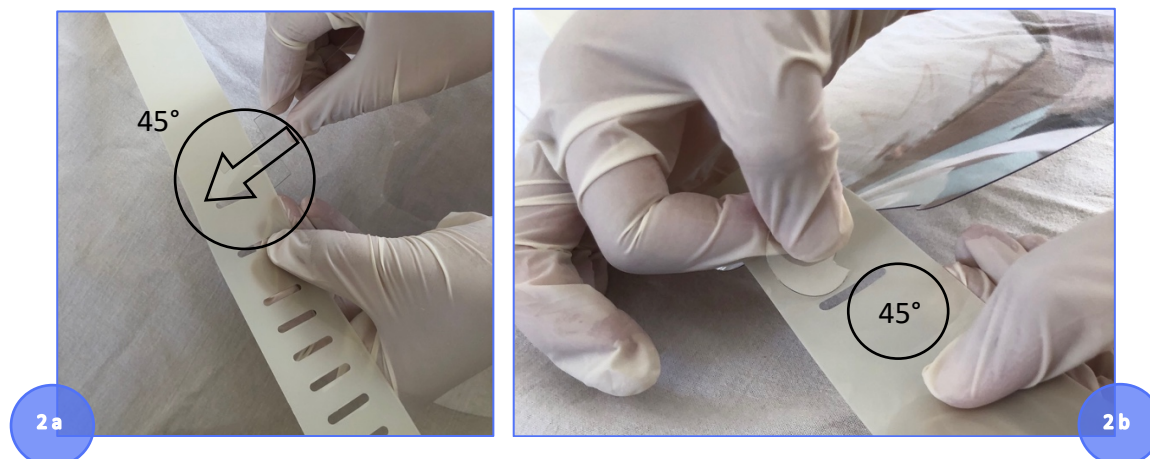

Troisième étape :

Pour un confort optimal, ajuster le bandeau à votre tête. Pour ce faire, attrapez la **languette de réglage** et insérez là, de la même manière que dans l'étape deux, dans la **fente de réglage** (3a) qui convient à votre tour de tête. Le tour est joué ! Vous pouvez disposer la visière sur votre tête (3c). Le haut de la visière doit bien se retrouver positionné **devant le bandeau**. Vous devrez avoir un rendu tel que la photo ci-dessous (3d).

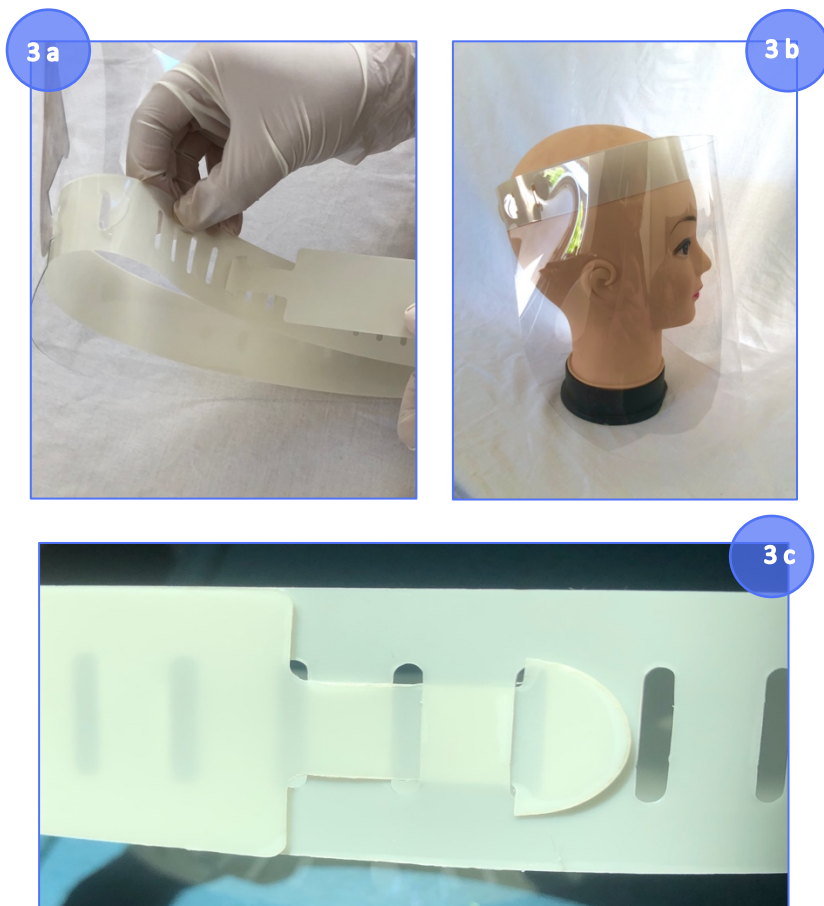

• Utilisation

Il convient :

- De manipuler la visière par le bandeau autour de la tête pour l'enlever
- De nettoyer la visière sans délai après l'avoir enlevée
- De pratiquer un lavage simple ou une friction hydro alcoolique des mains avant et après chaque changement de visière
- Chaque visière est individuelle, il conviendra à chaque utilisateur de ne pas échanger sa visière avec celle d'un autre
- De laisser la visière dans un environnement à température ambiante

Quelques mauvais conseils qu'il faut absolument éviter :

- Ne crachez pas sur votre visière pour le nettoyer, vous allez encore plus la salir ;
- N'appuyez pas trop fort sur la visière, vous risquez de l'abîmer ;
- N'utilisez pas de serviette en papier ou du papier de soie. Ces derniers contiennent des fibres de bois qui peuvent abîmer votre visière ;
- N'utilisez pas de produits abrasifs (souvent à base de céramique ou polyester) ;

• Nettoyage / entretien

De manière générale, la visière est à nettoyer :

- Au moins toutes les 4 heures, en cas de port de longue durée
- En cas de souillure, de projection ou tout contact potentiellement contagieux sur la surface de la visière
- Si elle a été enlevée pendant sa période d'utilisation
- De préférence à l'aide d'un carré de coton, une lingette antiseptique ou d'un chiffon en tissu microfibres en formant de petits cercles (*astuce : tremper le chiffon en tissu microfibres dans de l'eau chaude avant utilisation pour maximiser son efficacité. Cela ouvre ses fibres et libère les saletés antérieures contenues dans les microfibres*)

Pour le nettoyage de la visière, nous préconisons d'utiliser, une des trois propositions suivantes :

- Eau savonneuse (maxi 60°C)
- Désinfectant ménager standard
- Ethanol ou Alcool isopropylique (*attention ce composé chimique désinfectant et antiseptique est inflammable et irritant. Conseils : maintenir loin de la chaleur, de toute flamme et des enfants. Fortement déconseillé de le respirer afin d'éviter des maux de tête et des vertiges.*)

Ne pas utiliser de matières ni de produits abrasifs (type acétone).

Le séchage est réalisé à l'air ambiant ou sera réalisé grâce à un tissu/papier sec **non abrasif**.

• Protocole et nettoyage

Les visières peuvent être nettoyées avec un chiffon imprégné d'eau savonneuse, puis rincées à l'eau propre. Un chiffon imprégné d'eau contenant une faible quantité de désinfectant ménager standard ou d'éthanol, ou d'alcool isopropylique peuvent-être utilisés en complément ou à la place de l'eau savonneuse.

Attention - cet équipement de protection ne peut être considéré comme une dérogation supplémentaire de sortie. La visière arrive en 6e mesure des gestes barrières.


Rappel des gestes barrières :




Se laver très régulièrement les mains



Tousser ou éternuer dans son coude

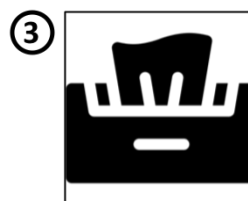


Utiliser des mouchoirs à usage unique

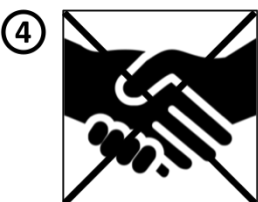

Saluer sans se serrer la main



Rester à la maison

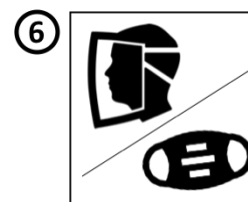

Utiliser des protections visières / masques